

Visionnez les vidéos d'instructions sur https://bit.ly/now-video Contactez l'assistance technique en écrivant à support@WearAndHear.com

Wear & Hear

Contenu de la boîte

Casque audio



Pochette de voyage



Embouts intra-auriculaires

(différentes formes et tailles)

 Oreillettes (3 tailles)




Coussinets de protection

contre le vent *(2 paires)*

• Câble de chargement



Casque audio

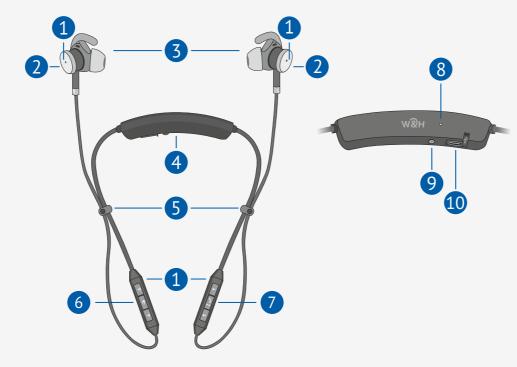

- **1** Micros
- 2 Aimants pour assembler les embouts lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- **3** Oreillettes et embouts en silicone
- 4 Cordon tour de cou
- 5 Clips pour fixer le câble
- **6** Commandes auditives d'assistance
- 7 Commandes de musique/d'appel
- 8 Voyant lumineux
- 9 Bouton Marche/Arrêt
- **10 -** Port USB

3 Application pour Smartphone

Pour obtenir de meilleurs résultats, personnalisez d'abord votre casque BeHear NOW à l'aide de l'évaluation auditive de notre application pour Smartphone.

Démarrez le processus de personnalisation en téléchargeant l'application W&H BeHear depuis Google Play Store ou l'Apple App Store sur votre téléphone.









Utilisez ensuite l'application W&H BeHear pour gérer et personnaliser votre casque audio BeHear ou pour obtenir de l'aide.







Charger le casque audio

Au départ, la batterie doit être suffisamment chargée pour effectuer l'évaluation auditive. Chargez ensuite la batterie pendant 3 heures maximum jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne vert.

- · Chargez le casque audio directement depuis une prise murale ou un port USB de l'ordinateur.
- Le voyant lumineux reste rouge pendant la charge et devient vert lorsque le casque est complètement chargé.





Allumer et éteindre le casque

1. Pour allumer ON BeHear NOW, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil vibre et que le voyant lumineux devienne bleu clair.

2. Pour éteindre ON BeHear NOW, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil vibre et que le voyant lumineux bleu s'éteigne.




Connecter le casque au téléphone

- 1. Éteignez le casque BeHear NOW.
- 2. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à s'allumer en alternance rouge/bleu.
- 3. Lancez l'application et suivez les instructions.


Pour iOS (iPhone) uniquement : Allez à « Paramètres » >> « Bluetooth » et ajoutez BeHear NOW à « Mes appareils ».




4. Dans l'application W&H BeHear, localisez votre casque audio BeHear NOW, suivi de son numéro de série, dans la section Disponible. Appuyez sur cette entrée. Une fois l'appairage terminé, il se déplacera vers la section Appairé et un 🗸 apparaîtra.

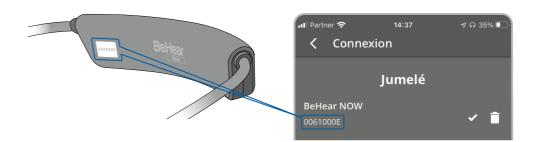


Recommandations sur le port du casque

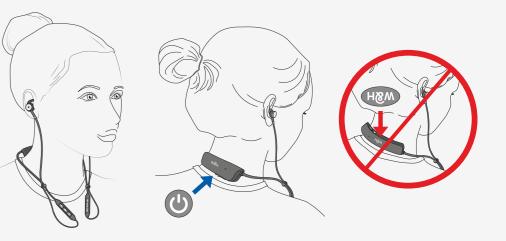

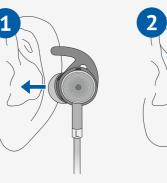





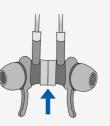

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les écouteurs peuvent être assemblés à l'aide des aimants intégrés et reposer sur votre poitrine.

8 Réglages à l'oreille

Si les embouts fournis par défaut ne sont pas confortables, remplacez-les. Utilisez les embouts les plus confortables pour l'étape de personnalisation de la section suivante.

• Choisissez la forme d'oreillette la mieux adaptée à votre morphologie.










· Remplacez l'embout intraauriculaire en appuyant légèrement dessus pour le fixer sur l'écouteur ovale.

et Right (droite en anglais).

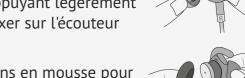

• Placez les coussins en mousse pour réduire le bruit du vent (facultatif).



🖲 Les écouteurs 📹 🔍 peuvent être utilisés pour l'évaluation de l'auditionmais le graphique qui en résulte ne représentera pas les véritables valeurs de l'audiogramme. Cependant, les performances du casque seront optimisées pour ces adaptations.














Personnalisation


Réglez les performances acoustiques du casque en fonction de vos préférences auditives personnelles.

- 1. Mettez le casque en insérant les oreillettes.
- 2. Dans l'application W&H BeHear, choisissez Personnel >> Évaluation.
- **3.** Suivez les instructions pour effectuer l'évaluation de l'audition.
- 4. Enregistrez et appliquez les résultats au casque.

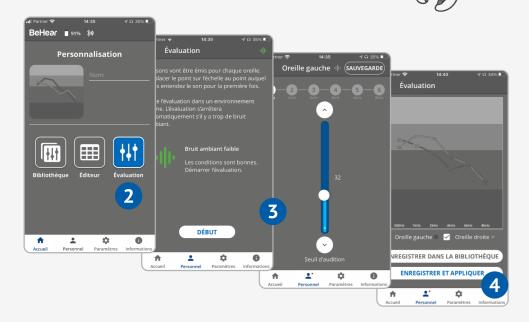

Amplification auditive

Activez l'amplification auditive et réglez le volume chaque fois que vous en avez besoin à l'aide des COMMANDES DE DROITE.

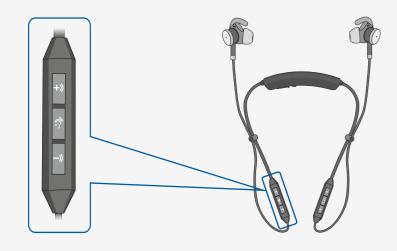



Pression longue pour activer/désactiver l'amplification

Pression courte pour faire défiler les profils d'audition.



Augmenter le volume d'audition.




Diminuer le volume d'audition.

Appels téléphoniques

Gérer les appels téléphoniques

Gérez les appels depuis un téléphone mobile connecté à Bluetooth à l'aide des COMMANDES DE GAUCHE.

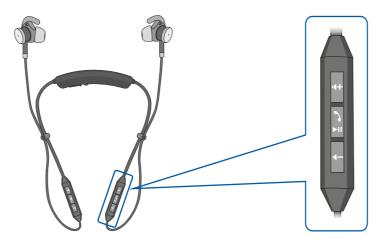



Pression courte pour accepter un appel entrant. Pression courte pour mettre fin à l'appel en cours. Pression longue pour refuser un appel entrant. Double pression pour recomposer le dernier numéro.




Augmenter le volume d'audition.



Diminuer le volume d'audition.

Ralentissez la parole avec EasyListen™

Ralentissez la vitesse de la voix entrante pendant un appel téléphonique en cours avec EasyListen, activé à l'aide des **COMMANDES DE DROITE.**

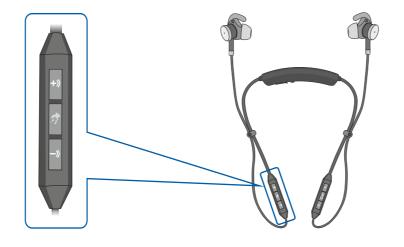




Pression longue pour activer/désactiver EasyListen. Le rythme de la parole est réglé sur Normal lorsque EasyListen est désactivé.

Pression courte pour faire défiler les trois options de rythme: Lent, plus lent et le plus lent.

Lecture audio

Gérer la lecture audio

Gérez la lecture audio depuis un appareil connecté Bluetooth à l'aide des **COMMANDES DE GAUCHE**.

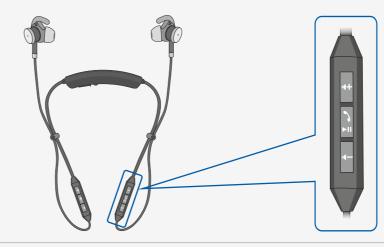



Pression courte pour basculer de Lecture à Pause. **Double pression** pour passer à la piste audio suivante. **Triple pression** pour revenir à la piste audio précédente.




Augmenter le volume.



Diminuer le volume.

Restez en sécurité et alerte avec ListenThrough™

Restez alerte avec ListenThrough tout en écoutant de la musique à l'aide des COMMANDES DE DROITE.

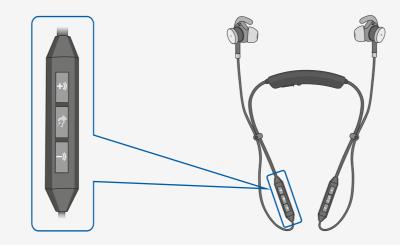



Pression longue pour activer/désactiver ListenThrough.



Augmenter le volume du son ambiant.



Diminuer le volume du son ambiant.

Indications d'état des voyants lumineux

Les voyants lumineux indiquent les statuts d'alimentation et de fonctionnement du casque.

Indication	Statut
Bleu clair	 Le casque est allumé/éteint (bascule)
Violet, clignotant	Fonction auditive active
Rouge/bleu en alternance	Mode d'appariement Bluetooth
Rouge, clignotant	 Déconnecté de l'appareil Bluetooth appairé ou batterie faible
Rouge, constant	En cours de chargement
Vert, constant	Batterie entièrement chargée
Si l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation	Niveau de la batterie :
• Vert	• Bon > 50 %
JauneRouge, clignotant	Passable > 10 % et < 50 %Faible < 10 %
	(a besoin d'être rechargée !)

14 Dépannage

Si votre casque BeHear NOW fonctionne de façon inattendue :

- Redémarrez le casque en le branchant sur le chargeur. Toutes les données de configuration et de connexion seront conservées.
- Si vous n'avez pas utilisé votre casque pendant environ une heure, une pression rapide sur son bouton d'alimentation devrait renouveler la connexion à tout appareil appairé (téléphone, ordinateur portable, etc.).
- Si les boutons de menu de l'application sont grisés, le casque n'est pas connecté à votre téléphone. Allez à l'écran Paramètres/Connexion pour vérifier que BeHear NOW est dans la liste des appareils appairés. Appuyez dessus pour activer la

Pour plus de FAQ, allez à : www.WearAndHear.com/faqs

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

• Identifiant FCC: 2AM3SABH-101

Déclaration de conformité UE

Alango Technologies Ltd. déclare par la présente que cet appareil sans fil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE. Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur www.wearandhear.com/compliance

Informations de l'UE sur l'élimination des produits 🗵

Le symbole ci-dessus signifie que conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de la mise au rebut aideront à conserver les ressources naturelles et à garantir qu'il est recyclé de manière à recycler la santé humaine et l'environnement.