

HearLink®

PLUS

Guide de démarrage rapide



Modèle: BT5805A




BESOIN D'AIDE ?

Regardez des vidéos de démonstration sur <https://bit.ly/HLplus-video>
Contactez le support technique : support@WearAndHear.com


BeHear

1


Contenu de la boîte

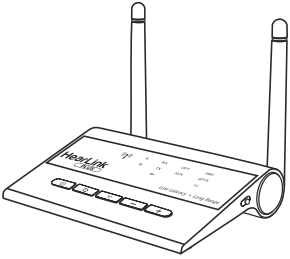


Appareil
HearLink Plus

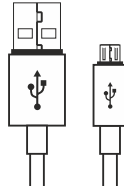


Câble
d'alimentation USB

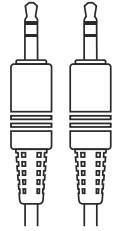


Câble audio
jack 3,5 mm

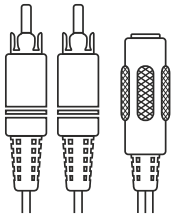

Adaptateur RCA
vers jack 3,5 mm

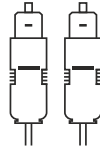


Câble audio
optique

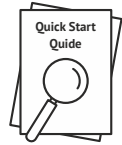






Ce guide de
démarrage rapide

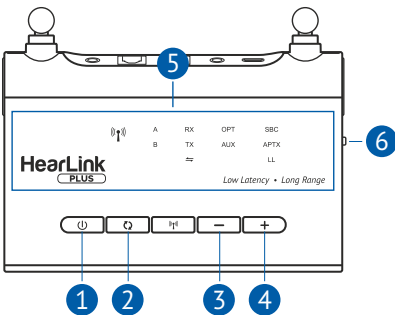2

Détails de l'appareil




- 1 -  Bouton Marche/Arrêt
- 2 -  Bouton Bluetooth
- 3 -  Piste précédente/
Baisser le volume
- 4 -  Piste suivante/
Augmenter le volume
- 5 - Panneau d'affichage avant avec voyants LED
- 6 - Changer de mode
- 7 - Entrée câble micro USB
- 8 - Entrée câble audio jack
- 9 - Entrée câble audio optique

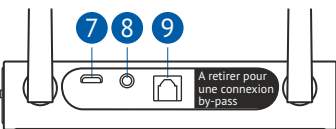


3 Configuration de HearLink PLUS


1. Connectez HearLink PLUS à une prise de courant (A) ou au port USB du téléviseur (B) à l'aide du câble d'alimentation USB fourni. HearLink PLUS s'allumera automatiquement.

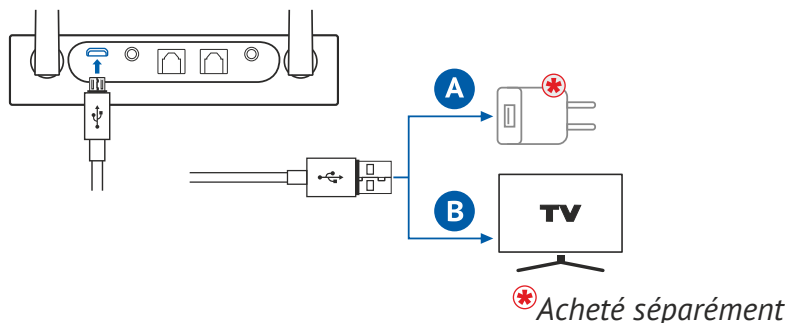

2. Assurez-vous que le sélecteur de mode est réglé sur la position **TX**.

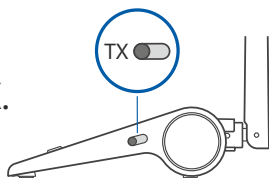

3. Connectez le port HearLink PLUS TX au téléviseur (ou à un autre périphérique multimédia) via le câble optique ou audio jack 3,5 mm fourni.

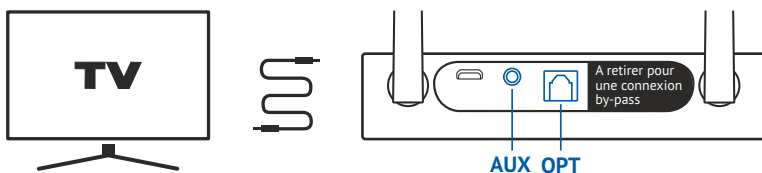


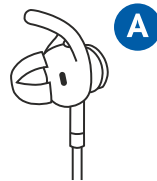
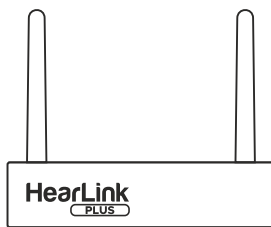
Assurez-vous de retirer les protections en plastique des bornes du câble optique avant insertion.



Le mode de connexion actif est indiqué par le voyant lumineux (**OPT** ou **AUX**) sur le panneau d'affichage avant du HearLink PLUS.

4 Première connexion

1. Mettez HearLink PLUS en mode « appairage » en appuyant brièvement sur le bouton . En mode « appairage », le voyant lumineux **TX** clignote rapidement.
2. Mettez l'amplificateur auditif sans fil Bluetooth en mode « appairage ». Reportez-vous à la documentation technique de l'amplificateur auditif pour les instructions d'appairage.
3. Placez l'amplificateur Bluetooth à proximité de l'appareil HearLink PLUS.



Amplificateur auditif sans fil Bluetooth

4. Lorsque l'appairage est terminé (après 5 à 30 secondes), **TX** s'allume sur le panneau d'affichage du HearLink PLUS. **LL** est allumé pour indiquer que le CODEC Bluetooth APTX-LL à faible latence est utilisé.

La connexion réussie de l'amplificateur auditif est indiquée par le **A** allumé sur le panneau d'affichage du HearLink PLUS.



*La connexion se fait automatiquement. Si non, pour les amplificateurs BeHear, une brève pression sur le bouton **Marche/Arrêt** devrait rétablir la connexion.*

5 Lecture audio

1. Commande à distance de l'amplificateur Bluetooth

Gérez la lecture audio à l'aide des commandes de l'amplificateur.



Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour basculer entre **Lecture/Pause**.



Appuyez sur le bouton **Augmenter le volume** pour augmenter le volume.



Appuyez sur le bouton **Baisser le volume** pour baisser le volume .

Pour les amplificateurs BeHear uniquement :



Pour basculer entre deux sources audio (par exemple, HearLink PLUS et un smartphone), appuyez simultanément sur les boutons Augmenter et Baisser le volume de l'amplificateur auditif, situés sur le boîtier de commande gauche.

2. Commande manuelle de HearLink PLUS



Appuyez brièvement pour basculer entre le mode **Lecture/Pause**.




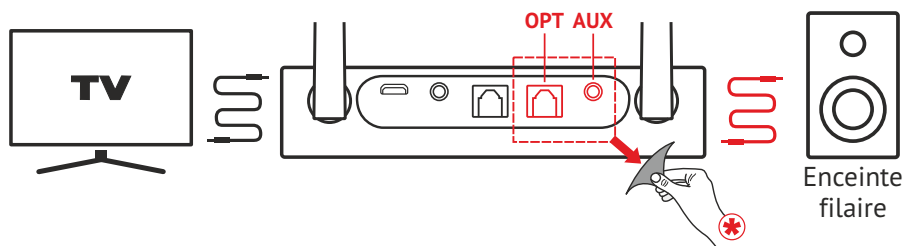
Appuyez pour **Augmenter le volume**. Un son est émis lorsque le volume maximum est atteint.



Appuyez pour **Baisser le volume**. Un son est émis lorsque le volume minimum est atteint.


6 Informations utiles

1. Si vous n'entendez pas le son :
 - Assurez-vous que le port « sortie audio » de votre téléviseur (ou autre appareil multimédia) connecté à HearLink PLUS est actif. Pour certains appareils, vous devez activer la sortie audio. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.
 - Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** de l'amplificateur auditif ou sur le bouton  du HearLink PLUS.
2. Utilisez le mode **By-pass** HearLink PLUS pour conserver les interfaces existantes entre votre téléviseur et le périphérique audio.



 Retirez l'autocollant pour accéder aux ports **RX**.

Connectez le port HearLink PLUS TX au téléviseur via le câble optique ou audio jack 3,5 mm et le port RX à une enceinte ou à un autre périphérique audio en utilisant le même type de câble que pour la connexion au port TX.

Pour passer à HearLink PLUS, réglez son sélecteur de mode sur la position **By-pass**, indiquée par . Pour rétablir la connexion avec l'amplificateur, réglez le sélecteur de mode sur **TX**.

